

Attends®

“Attends
produkter är
diskreta och
absorberar
mycket mer”



“Mycket bra
absorption,
mjuka och inte
för klumpiga!”

Kundundersökning Attends Soft, Storbritannien, juli 2010

Vårt Löfte:
Torrhet & Diskretion

Torrhet

Attends produkter ger användaren utmärkt läckagesäkerhet och hudtorrhet




Attends produkter fokuserar på snabb absorption där det verkligen behövs: i skyddets mitt. Resultatet av detta är att den största delen av aktiva ingredienser (fluff och superabsorbenter) placeras i mitten av skyddet och det är detta vi kallar Active Zone. Om du ser en av eller båda dessa symboler på påsen eller i vårt broschyrmaterial så kan du vara säker på att produkterna är designade utifrån den senaste absorptionsteknologin och därmed ger en utmärkt torrhet för användaren.


Spridningsskikt



Övre kärna

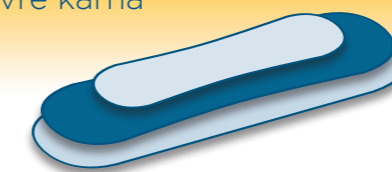

Undre kärna

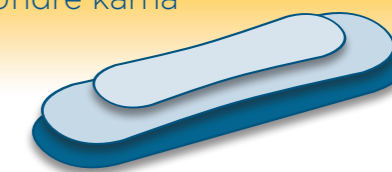

Attends designar och tillverkar produkter enligt den senaste absorptionsteknologin vilket innebär att produkten oftast har dubbla absorberande kärnor sammansatta till en. Den övre kärnan absorberar vätskan snabbt och transporterar den ner i den undre kärnan där den kapslas in för att undvika återvätning. Kärnorna består av följande material: fluff (för snabb absorption) och superabsorbenter (för att kapsla in vätskan). Dessa material kombineras på olika sätt beroende på typ av produkt och grad av inkontinens.

Den dubbla kärnan är även utrustad med ett spridningsskikt placerat i skyddets mitt. För de flesta produkterna som är avsedda att hantera medel/tung inkontinens så kallas detta spridningsskikt för Quick-Dry och det har förmågan att hantera flera miktationer utan att återväta till produktens ytskikt. Produkterna avsedda för lätt inkontinens har en annan typ av spridningsskikt som är bättre lämpat för dessa produkter.

Hur produkter testas

Attends produkter testas kontinuerligt, både i laboratoriemiljö och under verkliga förhållande tillsammans med vårdpersonal och användare.

Laborrietester ger oss bevis på våra produkters torrhet och detta mäts i vad vi kallar "absorptionshastighet" och "återvätning". Ju högre absorptionshastighet, desto mer vätska per sekund absorberar produkten och därför är detta ett bra mått för läckagesäkerhet. Ju lägre återvätning, desto torrare känns produkten mot huden. Både absorptionshastighet och återvätning är parametrar som speglar hur väl produkten fungerar för användaren i en verklig situation.




Användartester under verkliga förhållanden mäter hur produkten fungerar överlag och innefattar läckagesäkerhet och hudtorrhet så väl som komfort, passform och hur enkel produkten är att använda. En annan viktig del av användartester är att det möjliggör observation samt insamlande av "volymdata". Detta är information om hur mycket urin som faktiskt finns i produkten vid byte och var i produkten vätskan har absorberats. Sammanställningen av volymdata gör det möjligt att driva design och utveckling av våra produkter framåt för att försäkra oss om att vi erbjuder absorption där det verkligen behövs samt att vi erbjuder en säkerhetsnivå som uppfyller användarens behov.

Grafen nedan visar en sammanställning av volymdata från en produkt med absorptionskapacitet 10, liknande den produkt som visas i graferna från laborietesterna. Datan visar att majoriteten av produkterna innehåller mellan 100g och 500g urin.


100 Attends-produkter, i storlek Medium, med absorptionskapacitet 10, uppmätt mellan januari och maj 2013, i Sverige och Finland. Fullständig data finns tillgänglig vid förfrågan.

Vid jämförelse av volymdata och grafen som visar produktens återvätning ser vi att produkterna känns torra mot huden.

Genom att kombinera laborieresultat med verkliga observationer behåller vi vårt fokus på kärnteknologi och lever därför upp till vårt löfte om torrhet.

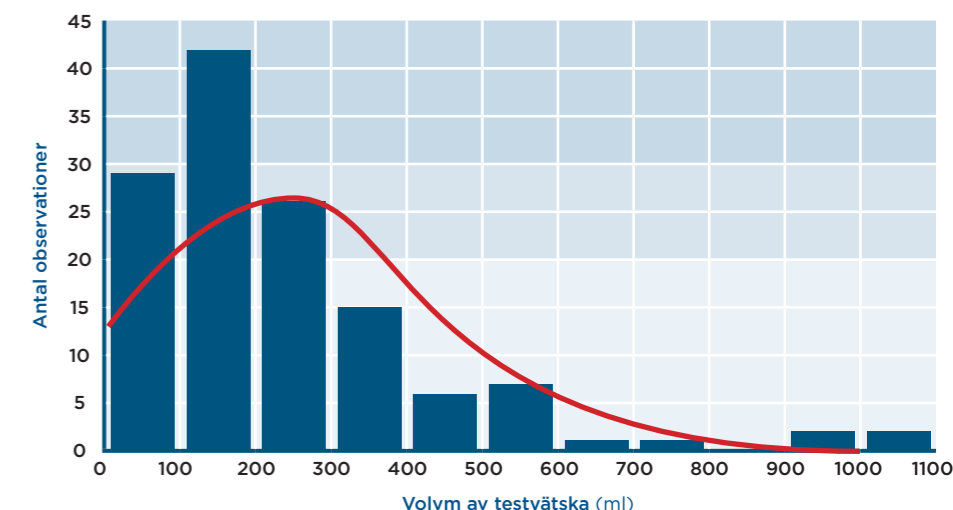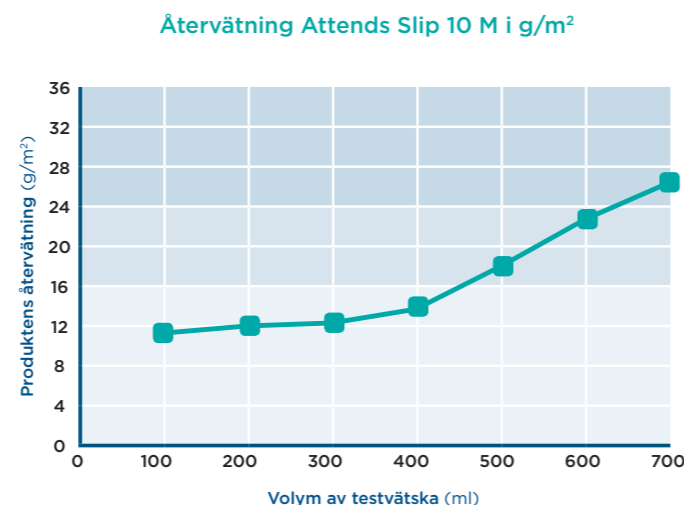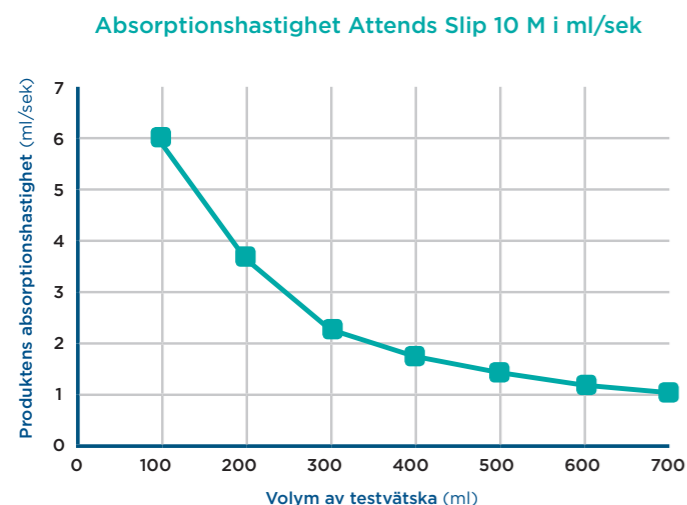

Diskretion

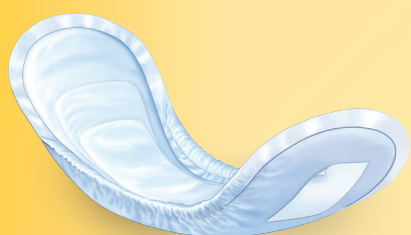

Attends Soft 7



Attends Contours 7

Attends produkter är utformade för att ge största möjliga diskretion.

Tack vare vårt fokus på absorptionsteknologi kan designen av Attends produkter hållas diskret: det finns inget behov av stora produkter tillverkade av onödigt mycket material om produktens kärna gör det jobb den är tänkt att göra.

Detta är också anledningen till varför Attends produkter i allmänhet är små och riktigt tunna: Sammansättningen av fluff och superabsorbenter i produktens kärna gör klumpiga och onödigt stora produkter till ett minne blott. Bilderna till vänster visar två produkter som är designade för att ge samma typ av skydd för urininkontinens. Attends Soft är designad enligt den senaste kärnteknologin och Attends Contours är en mer traditionell, stor produkt.

Detta gör att Attends produkter är diskreta att använda, bära med sig samt att göra sig av med efter användning. Förutom detta så resulterar produkternas diskreta utformning i små, smarta påsar och lådor vilket i sig har många fördelar så som färre transporter, mindre förvaringsutrymme hemma hos våra kunder samt mindre avfall när det gäller både produkter och förpackningsmaterial.

En annan viktig aspekt när det gäller diskretion är hur man använder färger och tryck. Attends använder färger och tryck på sina produkter för att underlätta identifikation, men dessa tryck hålls så små som möjligt för att ytterligare säkra produktens diskretion.

Slutligen så är alla Attends produkter utrustade med Natural Odour Protection vilket reducerar risken för otrevlig lukt, detta utan några tillsatser så som parfym. Superabsorbenterna i produktens kärna kapslar in urinen vilket hindrar uppkomsten av ammoniak. Tack vare Quick-Dry teknologin håller produkterna ett lågt pH-värde vilket minskar tillväxten av bakterier. Tillsammans förhindrar dessa egenskaper uppkomsten av otrevlig lukt och du kommer att känna igen detta med hjälp av följande symbol:



Kombinationen av produktdesign, materialval och Natural Odour Protection bidrar till Attends löfte om diskretion.



Du hittar Attends löfte "Torrhet & Diskretion" på våra nya påsar, i våra broschyrer och på vår hemsida.